



CETA
LA SOLUTION

VISIÈRE DE PROTECTION


Fabrication française



La Mulhousienne

Réf : 271-120-00-6

Taille unique — ajustable

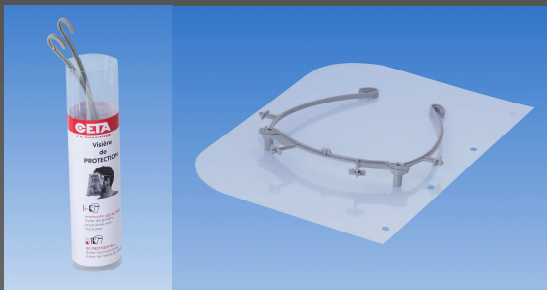

MONTAGE ET UTILISATION

Dérouler l'écran

Monter les 2 branches sur le support avant

Clipser l'écran sur l'arceau ainsi obtenu : le glisser dans l'encoche d'un côté, clipser sur chaque ergot, glisser dans l'encoche de l'autre côté et clipser sur le dernier ergot

Accrocher l'élastique aux branches si nécessaire et mettre la visière en place

PRECAUTIONS D'EMPLOI : nettoyer l'écran avec un désinfectant, de l'eau savonneuse ou du produit à vitre sans rayer ou endommager la surface

PROTEGER LES AUTRES



Evite les projections vers ses interlocuteurs

Evite les projections sur les objets environnants

SE PROTEGER



Evite les projections de ses interlocuteurs

Evite de porter les mains au visage

LES + PRODUIT

Pliable

Facile à stocker

Nettoyable

Réutilisable

Facile à monter

Ajustable

Peut se porter sur lunette de vue

Peut se porter sur les autres équipements de protection (masque, casque anti-bruit ...)

COMPOSITION

Arceau : ABS

Ecran de protection : PET

Elastique : caoutchouc

COLORIS

Arceau : gris

Ecran : transparent



CONCEPTEUR-FABRICANT ET IMPORTATEUR DE SOLUTIONS DE PROTECTION INDIVIDUELLE